

Coalgan® POUDRE

COMPOSITION / PROPRIÉTÉS

100% poudre d'alginate de calcium, issu d'algues marines, qui, au contact du sang, subit une modification physique et chimique entraînant une double action :

- Mécanique en servant de support à l'adhésion des plaquettes.
- Biologique en libérant son calcium directement dans la plaie.

INDICATIONS

Arrêt du saignement et cicatrisation des plaies cutanées superficielles :

- coupures, écorchures, y compris difficiles d'accès (cuir chevelu, entre les doigts, zones de plis...),
- nombril après chute du cordon, érythèmes fessiers suintants, boutons de varicelle suintants.

Nourrisson, enfants, adultes (y compris chez la femme enceinte et les personnes présentant des difficultés de coagulation).


BÉNÉFICE CLINIQUE / PERFORMANCE

Coalgan® POUDRE favorise :

- L'arrêt du saignement en accélérant la formation du caillot sanguin.
- La cicatrisation en maintenant un environnement humide et en contribuant au bon fonctionnement des cellules responsables de la cicatrisation.

CONTRE-INDICATIONS / EFFETS INDÉSIRABLES

Aucune contre-indication ou effet indésirable connu à ce jour. Tout incident grave doit être signalé aux Laboratoires Brothier (vigilance@brothier.com) et déclaré auprès de l'ANSM (Agence Nationale de Sécurité des Médicaments et des produits de santé) via le système national de déclaration sur le site : www.signalement-sante.gouv.fr

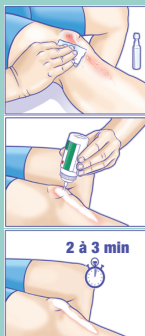

MODE D'UTILISATION

Nettoyer la plaie avec de l'eau et du savon ou du sérum physiologique (NaCl à 0,9 %).

Ne pas retirer la poudre de la plaie : elle sera éliminée naturellement. Recouvrir la plaie avec un pansement, si nécessaire.

Utilisable jusqu'à cicatrisation complète, par le patient ou un tiers.

MISES EN GARDE / PRÉCAUTIONS D'EMPLOI / INTERACTIONS

En cas de saignement abondant, comprimer la plaie avec Coalgan® COMPRESSE ou Coalgan® MECHE.

Si le saignement persiste une dizaine de minutes après application et compression de la plaie, consulter un médecin. En cas de signes d'infection (rougeur, chaleur ou boursoufflement autour de la plaie, suintement d'un liquide vert ou jaune), de fièvre ou de doute, demander l'avis d'un médecin ou d'un pharmacien.

En cas d'utilisation préalable d'antiseptiques à base d'hypochlorite de sodium, de chlorhexidine, de chlorure de benzalkonium ou de sels de cuivre, rincer abondamment avec du sérum physiologique (NaCl à 0,9%) avant usage.



CE
0459



Les Laboratoires BROTHIER
41, rue de Neuilly - 92000 Nanterre
France

www.brothier.com

www.coalgan-gamme.com

0 800 355 153 Service & appel gratuits

info@brothier.com

OUVERTURE ET FERMETURE



N1809 – 2024-06